


1 Rengör och torka den perianala huden innan den **Utanpåliggande Fekalkatetern** appliceras.


- Använd **inte** rengörande ämnen som innehåller olja eller krämer.
- Använd **inte** Cavilon eller andra liknande barriärprodukter.
- Kontrollera att huden är ordentligt torr och hel.

Avslutningsvis så förbered huden med en **Medical Skin Wipe** (medicinsk tvättduk). Den tar bort överbliven olja och fett från huden och ger bästa förutsättningar för fekalkatetern att fästa.

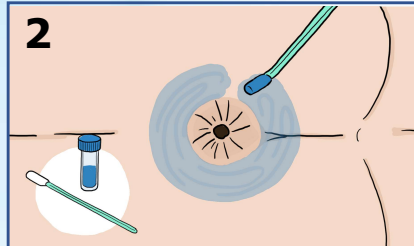


2 Applicera Furines **Vidhäftande Barriärfilm** på huden runt om anus med hjälp av den medföljande svabben. Applicera barriärfilmen cirka 3 cm brett.


OBS: Applicera hellre för mycket barriärfilm än för lite. Hela ytan av fästplattan ska täckas av barriärfilm. Om det efter applicering av den utanpåliggande fekalkatetern fortfarande är kvar barriärfilm utanför fästplattan så kan man torka bort den med den andra medicinska tvättduken som följer med i setet.

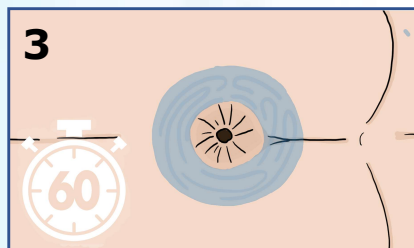

3 **Viktigt:** Låt den vidhäftande barriärfilmen torka i mellan 60-90 sekunder (tills den är torr) samtidigt som skinkorna hålls särade.

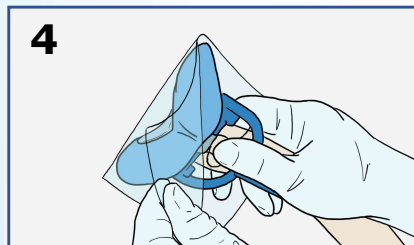


4 Ta bort skyddsremsan från den **Utanpåliggande Fekalkatetern**, samtidigt som man håller fekalkatetern säkert fixerad på applikationshjälpmedlet genom att hålla i vingarna.

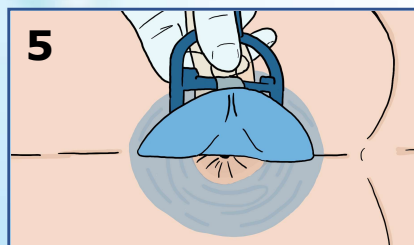

5 Med hjälp av applikationshjälpmedlet placerar man den **Utanpåliggande Fekalkatetern** mot huden. Se till så fästplattan fästs mot huden hela vägen runt om anus och på den tidigare applicerade **Vidhäftande Barriärfilmen**.

Fekalkatetern placeras och trycks mot den perianala huden så att den först kommer i kontakt med crena ani och perineum.

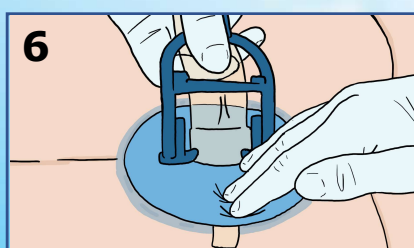

6 Efter det pressar man med två fingrar resten av fästplattan mot den omkringliggande huden.

